



補聴器の電源 オン/オフ



プログラムボタン長押しで電源ON/OFF

充電器から外すと補聴器の電源ON
充電器にセットすると補聴器の電源OFF


⚠ 使用時間の目安

- RICタイプ:20時間(ストリーミング使用なし)
- 耳かけ型:36時間(ストリーミング使用なし)

※フル充電には最長4時間かかります。
※上記使用時間はフル充電した場合の目安です。実際の使用状況により連続使用時間は変動します。

使い方【除菌乾燥充電器の場合】


- 1 充電器にUSBケーブル・ACアダプターをセットして電源コンセントにつなぎます。接続されるとインジケータが白色で5回点滅します。
- 2 補聴器をセットして、カバーを閉じます。補聴器の電源は自動的にオフになります。充電は補聴器が充電器にセットされると、除菌乾燥はカバーを閉じると、それぞれスタートします。

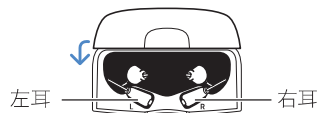

- 3 充電と除菌乾燥サイクルが自動的に実行されます。(フル充電:約4時間、除菌乾燥サイクル:約30分)

<p>充電</p> <p>除菌乾燥充電器本体</p> <p>ここが光ります</p>	<p>○ 緑の点滅</p> <p>正常に充電中</p> <p>充電電池残量 40%未満</p>	<p>○ 緑の明暗反復</p> <p>正常に充電中</p> <p>充電電池残量 40%以上 100%未満</p>	<p>○ 緑の点灯</p> <p>充電完了</p> <p>充電電池残量 100%(フル充電)</p>	<p>黄色の点滅</p> <p>充電一時停止</p> <p>周囲の温度または補聴器の温度が下がると充電を再開します。少しお待ちください。</p>	<p>× 赤の点滅</p> <p>エラー</p> <p>補聴器を取外し充電器の電源を10秒間切断してからもう一度お試しください。</p>
<p>除菌乾燥</p> <p>除菌乾燥充電器本体</p> <p>ここが光ります</p>	<p>○ 白の点滅</p> <p>除菌乾燥中</p>	<p>○ 白の点灯</p> <p>除菌乾燥完了</p>	<p>黄色の点灯</p> <p>除菌乾燥一時停止</p> <p>カバーが開いている場合、閉じると再開します。</p>	<p>× 赤の点滅</p> <p>エラー</p> <p>補聴器を取外し充電器の電源を10秒間切断してからもう一度お試しください。</p>	

使い方【スタンダード充電器の場合】

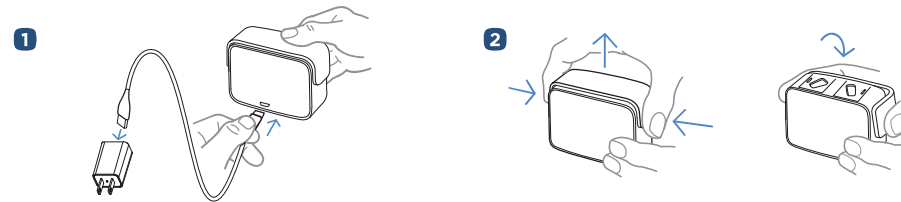

充電器にUSBケーブル・ACアダプターをセットして電源コンセントにつなぎます。接続されるとインジケータが白色に点滅します。

カバー付の場合はカバーの両側を持ち上げて後方へ倒して開き、補聴器をセットします。

- 3 補聴器を奥まで差し込んでください。検出中はインジケータが黄色に点灯します。補聴器の電源は自動的にオフになります。



<p>○ 緑の点滅</p> <p>正常に充電中</p> <p>緑の点滅:充電電池残量40%未満</p>	<p>○ 緑の明暗反復</p> <p>正常に充電中</p> <p>緑の反復点灯:(明⇄暗)充電電池残量40%以上</p>	<p>○ 緑の点灯</p> <p>充電完了</p> <p>緑の点灯:充電電池残量100%(フル充電 約4時間)</p>	<p>× 点灯しない</p> <p>正しくセットされていません</p> <p>補聴器が正しく置かれているか、充電器の電源が入っているか確認しましょう。</p>	<p>× 赤の点滅</p> <p>エラー</p> <p>補聴器を取外し充電器の電源を10秒間切断してからもう一度お試しください。</p>
---	--	---	---	--

改善しない場合はご購入店へご相談ください

湿気から補聴器を守るアクセサリがおすすめです。

湿気は補聴器にとって大敵です。汗や結露は故障の原因になります。大切な補聴器を長持ちさせるためにも使用しない時は、補聴器の湿気を除去する電気乾燥器や乾燥ケースに入れて保管するようにしてください。除菌と乾燥が一緒にできる製品もあります。その際は電池を補聴器から取り出すように(充電式を除く)してください。



※さまざまな製品があります。画像はイメージです。