

coselgiTMmojo

取扱説明書 イヤセット

コセルギ補聴器用




BTE 補聴器用イヤセット

(販売店が記入します)

お使いのイヤセットの種類：


RIC/RITE 補聴器用インスタントイヤチップ

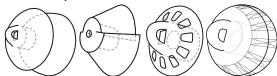

RIC/RITE 補聴器用カスタムイヤチップおよびイヤモールド




0.9 および 1.4 薄型チューブ付き補聴器用インスタントイヤチップ

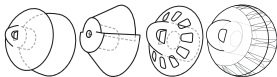

□ 0.9 および 1.4 薄型チューブ付き補聴器用カスタムイヤチップ



□ 従来の薄型チューブ付き補聴器用インスタントおよびカスタムイヤチップ

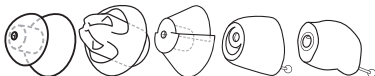

□ 従来のチューブ付き補聴器用イヤモールド



目次

イヤセットの概要	6
はじめに.....	6
レシーバーと薄型チューブを補聴器に取り付ける方法	6
RIC/RITE モデル用のインスタントイヤチップ	7
お手入れ用具.....	8
お手入れ.....	8
ワックスガードを使用.....	9
イヤチップの交換.....	12
イーチップロックを使用.....	13
RIC/RITE モデル用カスタムイヤチップおよびイヤモールド ド	15
お手入れ用具.....	16
お手入れ.....	16
ワックスガードを使用.....	17
EW フック&チューブ(0.9/1.4)用既製イヤチップ	20
お手入れ用具.....	20
お手入れ.....	21
ワックスガードを使用.....	22
イヤチップの交換.....	24

EW フック&チューブの交換.....	25
イーチップロックを使用.....	27
EW フック&チューブ(0.9/1.4)用カスタムイヤチップ.....	29
お手入れ用具.....	30
お手入れ.....	30
ワックスガードを使用.....	31
フック&チューブ用既製・カスタムイヤチップ.....	34
お手入れ用具.....	34
お手入れ.....	35
イヤチップの交換.....	36
EW フック&チューブの交換.....	38
イーチップロックを使用.....	38
標準フック用イヤモールド.....	41
お手入れ用具.....	41
お手入れ.....	41
チューブの交換.....	43
記号.....	44

イヤセットの概要

はじめに


本書はイヤセットの使用について説明しています。各部品のお手入れや交換については、お使いのイヤセットに関連する部分をよくお読みください。

付記

イヤセットおよびイヤセットの一部の部品は、本書に記載の図と異なる場合があります。また当社は、必要な場合には本書の内容を変更する権利を有します。

レシーバーと薄型チューブを補聴器に取り付ける方法

これはレシーバー/薄型チューブを補聴器に正しく取り付けるための方法で、すべてのイヤセットに共通です。

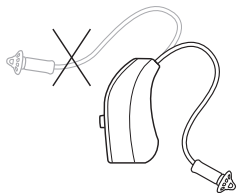

正しい取り付け方


レシーバー/薄型チューブが補聴器から離れた方向にアーチ状になるように取り付けてください。

誤った取り付け方

レシーバー/薄型チューブが補聴器の上方にアーチ状にならないようにしてください。


RIC/RITE モデル用のインスタントイヤチップ

この章では、RIC/RITE 補聴器モデル用の様々なインスタントイヤチップのお手入れと取り扱い方法について説明します。図にはオープンイヤチップの付いた補聴器が示されていますが、他のインスタントイヤチップでも手順は同じです。

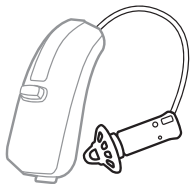

お手入れ用具

補聴器には次の清掃用具が同梱されています。

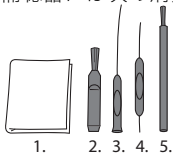


1. クリーニングクロス
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石

お手入れ



イヤセットが常に清潔で、耳垢、水分などが付着していないことを確認してください。
ご使用後はイヤワイヤを布で拭いてください。

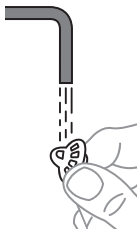

インスタントイヤチップは**残りのイヤセットから取り外し**ぬるま湯で洗浄できます。一晚乾燥させてください。



イヤセットのお手入れには、液体または殺菌剤は使用しないでください。



レシーバーは**決して**水と接触させないでください。損傷の原因になります。


ワックスガードの交換方法については、ワックスガードの項を参照してください。

ワックスガードを使用


ワックスガードは、耳垢の侵入を防ぎ、補聴器を保護するための部品です。必ずコセルギのワックスガードを取り付けてご使用ください。

ご使用のワックスガードに耳垢が詰まっていないことを以下の手順で定期的に確認してください。

まず、イヤワイヤからイヤチップを外します。耳垢がワックスガードに溜まっている場合は、ワックスガードを交換してください。

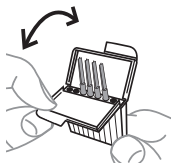


図示されているように、ワックスガードのケースを開きます。

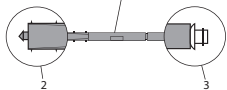


ワックスガードは以下の部品で構成されています。


- 1.ホルダー
- 2.取外しフック
- 3.新しいワックスガード

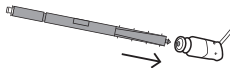

取外しフックを音口に取り付けられているワックスガードに挿入します。

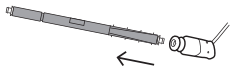


そのまままっすぐ使用済みワックスガードを引き抜きます。

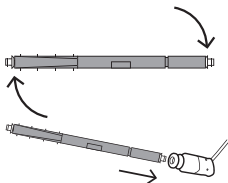



ホルダーの向きを変えます。

音口の開口部に新しいワックスガードを挿入します。ホルダーをまっすぐ引き抜きます。新しいワックスガードは自動的にホルダーから外れ音口に残ります。平らな所に音口を軽く押し付けワックスガードがしっかり取付けられているか確認します。イヤチップを元のように取り付けます。




 ワックスガードは使い捨てで、お掃除して再使用することはできません。

 ワックスガードの取付けがゆるい場合は、それを破棄して新しいワックスガードを使用してください。

 ワックスガードが補聴器の使用中に耳の内側で外れた場合は、医師または販売店に連絡してそれを取り外してください。自分自身でワックスガードを取り除こうとしないでください。

イヤチップの交換

必要に応じてイヤチップを交換してください。イヤチップの交換について、またはイヤチップが耳に合わなくなった場合は、販売店にご連絡ください。

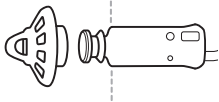


新しいイヤチップを、点線的位置までレシーバーに押し込みます。

レシーバーをイヤチップ内に押し込むと、カチッという音がして所定の位置に収まります。

付記


イヤチップがしっかりと固定されていることを確認することが重要です。

 補聴器からイヤワイヤを外そうとしないでください。

イーチップロックを使用

インスタントイヤチップの場合は、イヤチップの付け心地を向上させるため、イーチップロックを使用することができます。

イヤセットと共に提供された各種イーチップロックを取り付ける方法は以下を参照してください。

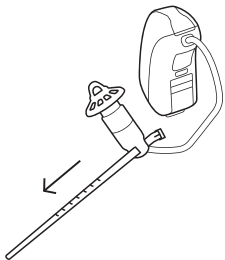

イーチップロック


チューブの側面にある穴から、イーチップロックの尖った先端を引きます。

イーチップロックの端がグリップで止まるまで引き続けます。

これでイヤセットをお使いいただけます。

耳の快適な位置に挿入してください。


ロック付きイーチップロック

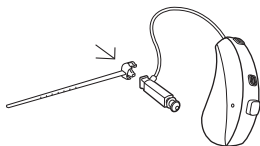

完全に挿入されるまで、レシーバーの平らな端の方向にアンカーロックを押します。
これでイヤセットをお使いいただけます。
耳の快適な位置に挿入してください。

RIC/RITE モデル用カスタムイヤチップ およびイヤモールド

この章では、RIC/RITE 補聴器モデル用の様々なカスタムイヤチップとイヤモールドのお手入れと取り扱い方法について説明します。別途記載のある場合を除き、図にはイヤチップ付きの補聴器が示されています。

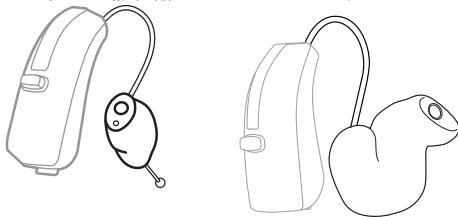


付記

イヤチップを耳から引き出す時は、必ず取外し用テグスを使ってください。

お手入れ用具

補聴器には次の清掃用具が同梱されています。

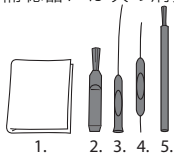

1. クリーニングクロス
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石


お手入れ



イヤセットは、耳垢や水分を取り除いて常にきれいな状態にしてください。ご使用後は、布でイヤワイヤを拭いてください。



小さいブラシまたは布を使い、音口部の周りに見える目に見える耳垢を取り除いてください。音口部が詰まっている場合は、ワックスガードを交換してください。ワックスガードをお掃除しようとししないでください。

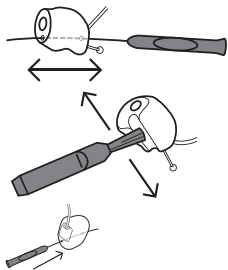

イヤチップ/イヤモールドにはベントが付いている場合があります。左の図は、さまざまなタイプのベントのお手入れの方法を表しています。



イヤセットのお手入れに液体や殺菌剤を使用しないでください。



イヤワイヤが破損する場合がありますので、絶対に、カスタムイヤチップ/イヤモールドまたは補聴器からイヤワイヤを取り外そうとしないでください。




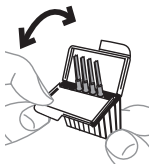
イヤワイヤを引っ張って耳から補聴器を取り外さないでください。

ワックスガードを使用


ワックスガードは、耳垢の侵入を防ぎ、補聴器を保護するための部品です。必ずコセルギのワックスガードを取り付けてご使用ください。

ご使用のワックスガードに耳垢が詰まっていないことを定期的に確認してください。

 イヤワイヤからカスタムイヤチップ/イヤモールドを取り外さないでください。




図示されているように、ワックスガードのケースを開きます。

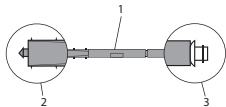


ワックスガードは以下の部品で構成されています。


1. ホルダー
2. 取外しフック
3. ワックスガード

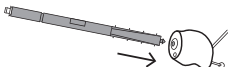


取外しフックを音口に取り付けられているワックスガードに挿入します。

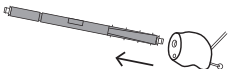

そのまままっすぐ使用済みワックスガードを引き抜きます。

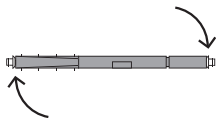

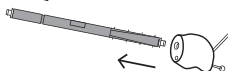


ホルダーの向きを変えます。



音口の開口部に新しいワックスガードを挿入します。ホルダーをまっすぐ引き抜きます。新しいワックスガードは自動的にホルダーから外れ音口に残ります。平らな所に音口を軽く押し付けワックスガードがしっかり取付けられているか確認します。



-  ワックスガードは使い捨てで、お掃除して再使用することはできません。
-  ワックスガードの取付けがゆるい場合は、それを破棄して新しいワックスガードを使用してください。
-  ワックスガードが補聴器の使用中に耳の内側で外れた場合は、医師または販売店に連絡してそれを取り外してください。自分自身でワックスガードを取り除こうとしないでください。


EW フック&チューブ(0.9/1.4)用既製イヤチップ

この章では、薄型チューブ 0.9&1.4 付き補聴器用の様々なインスタントイヤチップのお手入れと取り扱い方法について説明します。



お手入れ用具

補聴器には次の清掃用具が同梱されています。

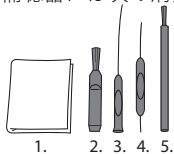


1. クリーニングクロス
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石

お手入れ



イヤセットが常に清潔で、耳垢、水分などが付着していないことを確認してください。使用後はチューブを布で拭き取ってください。

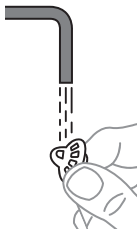

インスタントイヤチップは**残りのイヤセットから取り外し**ぬるま湯で洗浄することもできます。一晩乾燥させてください。



イヤセットのお手入れには、液体または殺菌剤は使用しないでください。


ワックスガードの交換方法については、ワックスガードの項を参照してください。

ワックスガードを使用

ワックスガードは、耳垢の侵入を防ぎ、補聴器を保護するための部品です。必ずコセルギのワックスガードを取り付けてご使用ください。

ご使用のワックスガードに耳垢が詰まっていないことを以下の手順で定期的に確認してください。


まず、チューブからイヤチップを外します。耳垢がワックスガードに溜まっている場合は交換してください。自分自身でワックスガードをお掃除しようとししないでください。

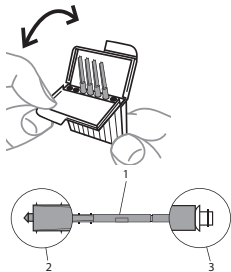


図示されているように、ワックスガードのケースを開きます。

ワックスガードは以下の部品で構成されています。


1. ホルダー
2. 取外しフック
3. ワックスガード

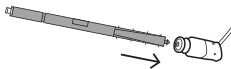


取外しフックを音口に取り付けられているワックスガードに挿入します。

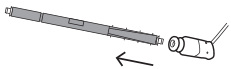

そのまままっすぐ使用済みワックスガードを引き抜きます。

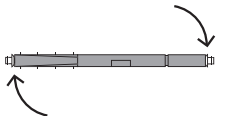

ホルダーの向きを変えます。

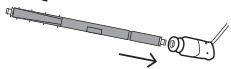


音口の開口部に新しいワックスガードを挿入します。ホルダーをまっすぐ引き抜きます。新しいワックスガードは自動的にホルダーから外れ音口に残ります。平らな所に音口を軽く押し付けワックスガードがしっかり取付けられているか確認します。イヤチップを元のように取り付けます。



- ⚠️ ワックスガードは使い捨てで、お掃除して再使用することはできません。
- ⚠️ ワックスガードの取付けがゆるい場合は、それを破棄して新しいワックスガードを使用してください。
- ⚠️ ワックスガードが補聴器の使用中に耳の内側で外れた場合は、医師または販売店に連絡してそれを取り外してください。自分自身でワックスガードを取り除こうとしないでください。

イヤチップの交換

必要に応じてイヤチップを交換してください。イヤチップの交換、またはイヤチップが耳に合わなくなった場合は、販売店にご連絡ください。

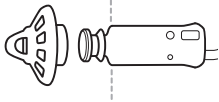

新しいイヤチップを、点線の位置までフック&チューブに押し込みます。チューブの端をイヤチップに押し込むと、カチッという音がして所定の位置に収まります。

付記

イヤチップがしっかりと固定されていることを確認することが重要です。

EW フック&チューブの交換

必要な場合にはチューブを交換してください。補給品については販売店にご相談ください。

補聴器からチューブを取り外すには、薄型チューブと共に提供された専用ツールを使用してください。


付記

ツールには様々な種類があります。提供された各種専用ツールを使用するには以下の手順に従ってください。


ワイドツール



1. 図に示される通り、チューブをツールに取り付けます。

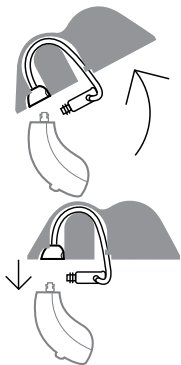

ナローツール

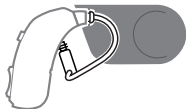


2.図に示される角度で、補聴器からイヤセットを持ち上げます。

3.ツールに新しいチューブを取り付け、補聴器に挿入します。

1.図に示される通り、チューブをツールに取り付けます。



2.図に示される角度で、ツールを下向きに押し込みます。

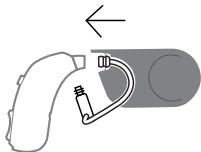


3.ツールに新しいチューブを取り付け、補聴器に挿入します。

イーチップロックを使用


イヤチップの付け心地を向上させるために、イーチップロックを使用することができます。

イヤセットと共に提供された各種イーチップロックを取り付ける方法は以下を参照してください。

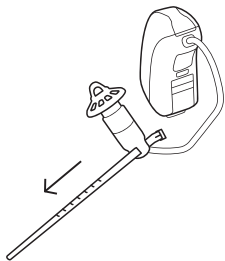

イーチップロック

チューブの側面にある穴から、イーチップロックの尖った先端を引き込みます。イーチップロックの端がグリップで止まるまで引き続けます。これでイヤセットをお使いいただけます。耳の快適な位置に挿入してください。

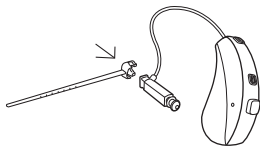


ロック付きイーチップロック

完全に挿入されるまで、レシーバーの平らな端の方向にアンカーロックを押します。これでイヤセットをお使いいただけます。耳の快適な位置に挿入してください。

EW フック&チューブ(0.9/1.4)用カスタムイヤチップ

この章では、薄型チューブ 0.9&1.4 付き補聴器用の様々なカスタムイヤチップのお手入れと取り扱い方法について説明します。

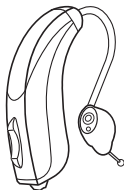


付記

カスタムイヤチップを耳から引き出す時は、必ず取外し用テグスを使ってください。

お手入れ用具

補聴器には次の清掃用具が同梱されています。

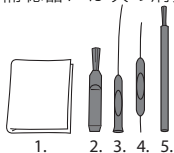


1. クリーニングクロス
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石

お手入れ



イヤセットが常に清潔で、耳垢、水分などが付着していないことを確認してください。使用後はチューブを布で拭き取ってください。

小さいブラシまたはクリーニングクロスを使い、音口部の周りにある目に見える耳垢を除去してください。音口部が詰まっている場合は、ワックスガードを交換してください。ワックスガードはお手入れしないでください。

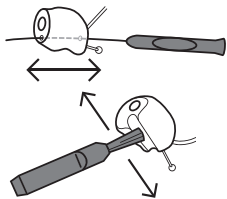

一部のイヤチップにはベントが付いています。下の図には、様々なタイプのベントのお手入れ方法が示されています。



イヤセットは、水、洗浄剤などの液体に接触させないでください。



耳から補聴器を取り外す際にチューブを引っ張らないでください。


ワックスガードを使用

ワックスガードは、耳垢の侵入を防ぎ、補聴器を保護するための部品です。必ずコセルギのワックスガードを取り付けてご使用ください。


ご使用のワックスガードに耳垢が詰まっていないことを定期的に確認してください。



チューブからカスタムイヤチップを取り外さないでください。

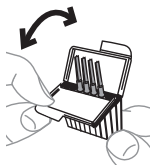


図示されているように、ワックスガードのケースを開きます。

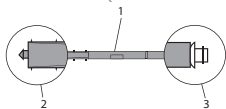


ワックスガードは以下の部品で構成されています。


- 1.ホルダー
- 2.取外しフック
- 3.ワックスガード

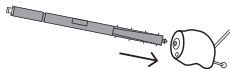


取外しフックを音口に取り付けられているワックスガードに挿入します。

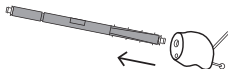

そのまままっすぐ使用済みワックスガードを引き抜きます。

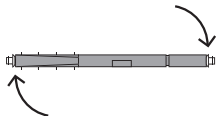

ホルダーの向きを変えます。

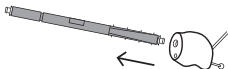

音口の開口部に新しいワックスガードを挿入します。ホルダーをまっすぐ引き抜きます。新しいワックスガードは自動的にホルダーから外れ音口に残ります。平らな所に音口を軽く押し付けワックスガードがしっかり取付けられているか確認します。



ワックスガードは使い捨てで、お掃除して再使用することはできません。




ワックスガードの取付けがゆるい場合は、それを破棄して新しいワックスガードを使用してください。



ワックスガードが補聴器の使用中に耳の内側で外れた場合は、医師または販売店に連絡してそれを取り外してください。自分自身でワックスガードを取り除こうとしないでください。


フック&チューブ用既製・カスタムイヤチップ

この章では、標準の薄型チューブ付き BTE 補聴器モデル用の様々なイヤチップのお手入れと取り扱い方法について説明します。

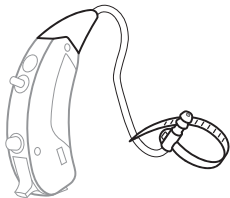


お手入れ用具

補聴器には次の清掃用具が同梱されています。

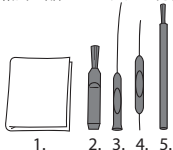

1. クリーニングクロス
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石

お手入れ

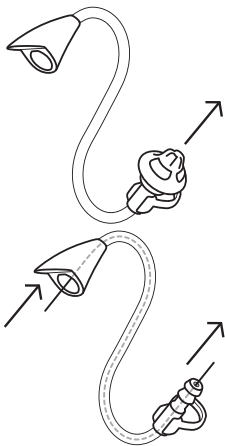

イヤチップを慎重にチューブから抜きます。
カスタムイヤチップをご使用の場合は、チューブのお手入れの際チップを取り出す必要はありません。


クリーニングスレッドを使い、チューブを清掃します。チューブ内にスレッドを通します。もう一方の端からスレッドを引き出します。クリーニングスレッドの入手方法についての詳細は、販売店にご相談ください。
インスタントイヤチップは**残りのイヤセットから取り外し**ぬるま湯で洗浄できます。一晩乾燥させてください。



イヤセットのお手入れには、アルコールまたは洗浄剤は使用しないでください。変色の原因になります。

イヤチップの交換

インスタントイヤチップをチューブに取り付ける

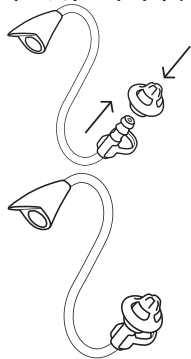


イヤチップにチューブを一番奥までそっと挿入します。確実に挿入されていることを必ず確認してください。

カスタムイヤチップをチューブに取り付ける

図に示されるように、カスタムイヤチップを持ち、チューブにそっと挿入します。一番奥まで挿入されるまで爪でチューブを押します。



EW フック&チューブの交換

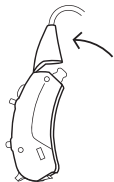

図のように、フック&チューブを後方に持ち上げ、補聴器から外します。





図のように、補聴器の上にフック&チューブを置き、カチッと鳴るまで押します。

イーチップロックを使用

既製ダブルドームイヤチップの場合、一体型のイーチップロックを、完全に切り離してください。

オープンイヤチップまたはチューリップイヤチップをお使いの場合には、イーチップロックの長さを調節して適当なサイズの輪を作り、耳の中でイヤチップが快適に保持されるようにします。イーチップロックの長さを調節するには以下の手順を実施します。

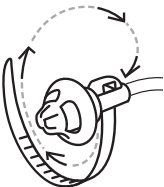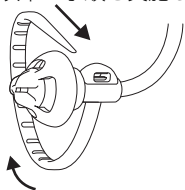


例 1

イーチップロックをチューブの側面にある小さな穴に通し、イーチップロックの先を引っ張ります。

輪のサイズが適当になったら、はさみなどを使い余分な部分を切り取ります。

例 2

点線と矢印の向きにイーチップロックを輪にします。

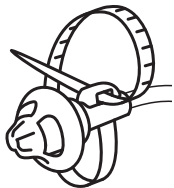

ハート型の輪ができるよう、
図のように、イーチップロック
の先をチューブの側面にある
小さな穴に通します。



輪のサイズが適当になったら、
イヤセットの方向を変え、
はさみなどを使い余分な部分
を切り取ります。

イーチップロックの輪によって補聴器が耳の中で適切な位置に収まり固定されている場合、輪は適切な大きさです。

付記

耳の中で不快感が生じないよう、イーチップロックの輪の端が小さい穴に収まり、尖った先端が出ていないことを確認してください。指先を使い、鋭い先端がないことを確認してください。

付記


カスタムイヤチップの場合、一体型のイーチップロックを完全に切り離してください。

標準フック用イヤモールド

この章では、BTE 補聴器モデル用の標準のイヤモールドのお手入れと取り扱い方法について説明します。

お手入れ用具

補聴器には次の清掃用具が同梱されています。

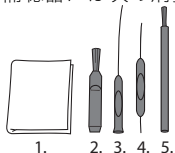


1. クリーニングクロス
2. ブラシ
3. 耳垢除去用具（長）
4. 耳垢除去用具（短）
5. 電池取り出し用磁石

お手入れ



イヤセットが常に清潔で、耳垢、水分が付着していないことを確認してください。ご使用後はイヤセットを布で拭いてください。

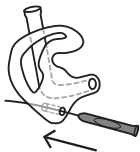


ベントがある場合は、耳垢除去用具でお手入れしてください。



定期的に、補聴器のイヤフックからイヤモールド付きのチューブを取り外してください。



チューブとイヤモールドをぬるま湯でよく洗ってください。
一晩乾燥させてください。

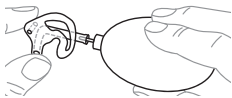

イヤモールドまたはチューブに水分が残っている場合は、チューブをイヤフックに取り付ける前に、ブLOWERなどを使用して水分を飛ばしてください。

! イヤセットのお手入れには、アルコールまたは洗剤は使用しないでください。変色の原因になります。

チューブの交換

イヤセットのチューブが破損した場合には交換する必要があります。

チューブの交換またはイヤモールドが耳に合わなくなった場合は、販売店にご相談ください。

記号

医療機器の表示（ラベルや取扱説明書など）で COSELGI A/S によって共通して使用される記号

記号 タイトル/説明



製造元

製品は、名称および住所が記号の横に記載されたメーカーにより製造されています。該当する場合、製造年月も記載される場合があります。



カタログ番号

製品のカタログ（品目）番号。



取扱説明書を参照

取扱説明書には安全に関する重要なお知らせ（警告/注意）が記載されていますので、製品のご使用前に必ずお読みください。



警告

警告記号を伴う事項は、製品のご使用前に必ずお読みください。



WEEE マーク

「一般廃棄物ではありません」製品の廃棄については、危険物質による環境や人の健康を害するリスクを防ぐため、指定されたリサイクル・回収場所に廃棄してください。

記号 **タイトル/説明**



CE マーク

製品は、CE マークに関する欧州指令によって定められた要件に適合しています。



RCM マーク

製品は、オーストラリアとニュージーランド市場に供給される製品に対する電気安全性、EMC、無線スペクトル規制要件に準拠しています。



技術基準適合証明マーク

この製品は日本の技術基準適合証明を受けたものです

ワイデックス株式会社
製造販売元 ワイデックス株式会社
〒131-0034 東京都墨田区堤通 1-19-9
リバーサイド隅田セントラルタワー
TEL 0120-332-604 FAX 0120-332-394
<http://japan.widex.com/>
許可番号 13B2X00020 管理医療機器



COSELGI A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark
www.coselgi.com

取扱説明書番号:
9 514 0561 016 #01
発行:
2020-01

